


E-PHOTON

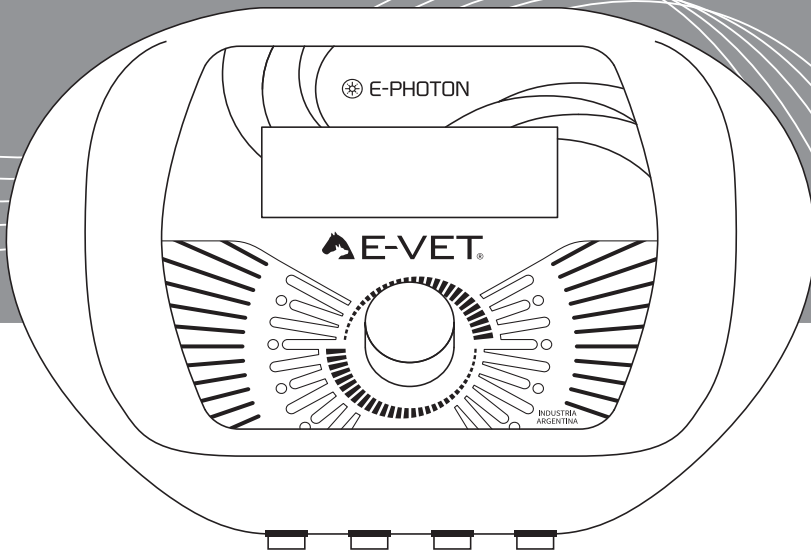

Fototerapia.

 **E-VET**®

PÁG.	SECCIÓN
3	01 » EMPRESA
4	02 » INTRODUCCIÓN
5	03 » EFECTOS / BENEFICIOS
6	04 » EQUIPO
7	05 » USO
11	06 » TRATAMIENTO
11	07 » CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
12	08 » CONTRAINDICACIONES
12	09 » ADVERTENCIAS
13	10 » ACCESORIOS
14	11 » DATOS TÉCNICOS
15	12 » SIMBOLOGÍA
15	13 » CONTROL DE ENTREGA
15	14 » SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
16	15 » GARANTÍA
17	16 » CONTACTOS / SERVICIO TÉCNICO
18	17 » NOTAS

Desde 1981, época en que **ELECTROMEDICINA MORALES** se inicia en el mercado de la medicina estética, fabricando su primer producto, el depilador por radiofrecuencia, y muy pronto vería la luz un segundo equipo, el ionto-contractor, de un avanzado diseño para la época, le permitiría introducirse definitivamente en el mercado de la belleza profesional siguiendo en camino con el desarrollo de aparatología para profesionales.

Dirigidos a kinesiólogos, médicos, cosmiatras, esteticistas, cosmetólogas y profesionales de la belleza en general, **ELECTROMEDICINA MORALES** continua desarrollando equipos de alta calidad, de la mano de los últimos avances tecnológicos.

Desde entonces, **ELECTROMEDICINA MORALES** sigue creciendo en estructura, recursos humanos y confiabilidad de sus productos, consolidándose como empresa de producción de equipamiento para kinesiología y estética.

Siempre manteniendo su **VISION, LIDERAZGO y CALIDAD**, como base la tecnología, innovación y postventa.

| Nuestra Misión.

Nuestra misión es el diseño, fabricación, comercialización y la asistencia técnica post-venta para equipamiento electromédico, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y usuarios en el tratamiento integral de la estética corporal, kinesiología, cosmética y las actividades de asesoramiento y capacitación que permiten maximizar las prestaciones de nuestros productos.

| Nuestra Visión.

Ser reconocidos entre nuestros clientes, usuarios y distribuidores por nuestra calidad de atención, la de nuestros servicios de asesoramiento y capacitación y sobre todo, por la calidad de nuestros productos, servicio post-venta y asistencia técnica.

Por todo lo expuesto, es que nos esforzamos en forma permanente para cumplir con nuestros objetivos.

| Nuestra Política de Calidad.

Nuestra misión y visión solo pueden ser tangibles mediante el compromiso de la Dirección General con los siguientes valores fundamentales, los cuales son comunicados y se consideran los cimientos para la construcción de nuestra organización:

- Nos comprometemos con la satisfacción de nuestros clientes comunicando nuestros objetivos a todo el personal y brindando los recursos necesarios para que la calidad de nuestros productos y servicios sea una consecuencia de la calidad de gestión de nuestros procesos.

- Nos comprometemos con el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, los legales y reglamentarios y cualquier requisito, aún aquellos no especificados pero necesarios para la seguridad y eficacia de nuestros productos.

- Nos comprometemos con la participación del personal, entendiendo que los Recursos Humanos son nuestro capital más importante y que la capacitación y la evaluación de su desempeño es la mejor inversión para el crecimiento de este capital.

- Nos comprometemos a evaluar a nuestros principales proveedores para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad, promover el compromiso y la participación y encontrar oportunidades de mejora.

- Nos comprometemos a mantener y mejorar la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad, mediante el establecimiento y seguimiento de indicadores que nos permitan verificar el cumplimiento de nuestros objetivos sin descuidar la rentabilidad de nuestra empresa.

- Nos comprometemos a comunicar, implementar y asegurar que esta Política es comprendida por toda la organización y a que la información que suministre nuestro sistema de gestión sea la herramienta de análisis para su continua adecuación.

02 » INTRODUCCIÓN

La Fototerapia es la terapia con luz (radiación) la cual se basa en la estimulación de los procesos energéticos y regenerativos bajo la acción de la luz de diferentes colores o longitudes de onda. Hoy se sabe que los organismos utilizan la energía que aporta la luz, la que activa una cadena de reacciones dentro de las células, las cuales estimulan el metabolismo y refuerzan la respuesta inmunitaria del organismo.

El estímulo a nivel mitocondrial de la luz infrarroja puede producir un aumento en la producción de ATP estimulando la reparación del daño celular.

Desde un punto de vista macroscópico, la interacción de las radiaciones empleadas en fototerapia con la materia se realiza básicamente en dos niveles: a) en las interfases, mediante los fenómenos de reflexión y refracción, y b) en el interior del medio, donde tiene lugar la transmisión, hecho que depende de los fenómenos de absorción y dispersión.

E-Photon equipo de fototerapia, provisto con 4 aplicadores de 32 leds cada uno y sensor de infrarrojos. Estos 32 leds de cada aplicador están distribuidos de la siguiente manera: 16 Leds Infrarrojos (longitud de onda 905nm), 12 Leds Rojos (longitud de onda 660nm) y 8 Leds Amarillos (longitud de onda 591nm). Éste equipo permite regular la intensidad de forma individual de cada longitud de onda y permite la modulación de frecuencia.

03 » EFECTOS / BENEFICIOS

El efecto terapéutico es la absorción de energía de la luz a nivel celular, la misma es utilizada para favorecer el proceso de reparación de los tejidos, cicatrización de heridas y para lograr una excelente relajación muscular gracias a su acción analgésica y anti-inflamatoria.

El empleo de terapia fotónica demostró que:

- Mejora la cicatrización de quemaduras y heridas.
- Estimula la formación de colágeno.
- Reducción de la formación de tejido fibroso.
- Reducción de la inflamación.
- Relajación Muscular.
- Analgésico.
- Antiinflamatorio.
- Trófico.





La clave para proporcionar terapia de luz eficaz es el uso de longitudes de onda de luz específicas, por lo cual los aplicadores están provistos de los siguientes emisores de luz:

16 Leds Infrarrojos, longitud de onda 905nm

12 Leds Rojos, longitud de onda 660nm

8 Leds Amarillos, longitud de onda 591nm

Dando un total de 36 Leds por aplicador.

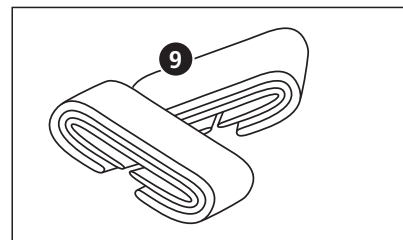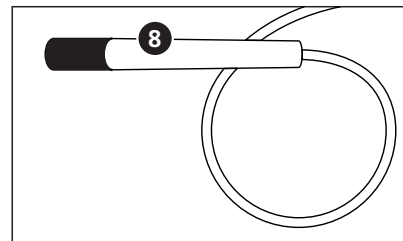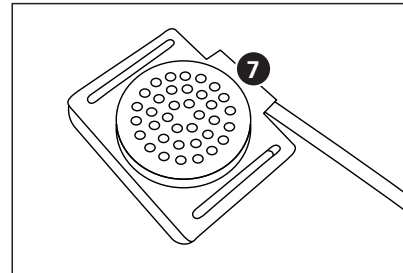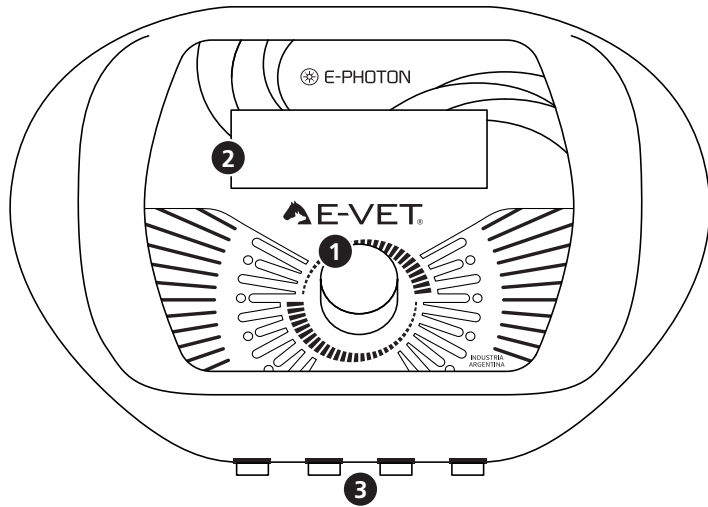

- 1- Regulador de intensidad / Pulsador Inicio y Cancelar.
- 2- Display de 20 caracteres por 4 líneas.
- 3- Salidas.
- 4- Entrada del detector de infrarrojo.
- 5- Llave de encendido.
- 6- Cable de alimentación.
- 7- Aplicador Fototerapia (16 Leds Infrarrojos, 12 Leds Rojos y 8 Leds Amarillos.)
- 8- Detector de Infrarrojo.
- 9- Bandas elásticas.

Conecte el equipo a un toma corriente de fácil acceso, asegúrese que el mismo posea una puesta a tierra segura.
 No tape las rejillas de ventilación, manténgala siempre libre para asegurar el buen funcionamiento del equipo.
 Encienda el equipo por medio de la tecla de Encendido, que se encuentra en la parte posterior.

Observará la pantalla de Inicio:



Luego mostrará el número de versión del Software:




A continuación la pantalla de selección **Programas / Manual:**

Gire la perilla del regulador para seleccionar si desea trabajar en modo: **Programas o Manual.** Una vez seleccionado presione la perilla.



Modo Programas.


El **E-Photon** cuenta con 42 programas preestablecidos, diseñados acorde a la necesidad del profesional.

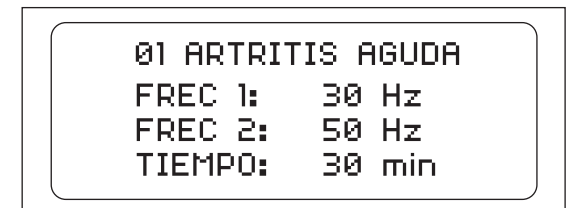

Gire a perilla para ir recorriendo los 42 programas, en los cuales en la parte inferior podrá ver los parámetros de cada frecuencia y el tiempo de duración.

NOTA: El **E-Photon** está diseñado para trabajar con dos frecuencias, esta modulación se realiza automáticamente cada 10 minutos a las frecuencias indicadas y es advertida por una alarma sonora.

Una vez seleccionado el programa a trabajar presione dicha perilla.

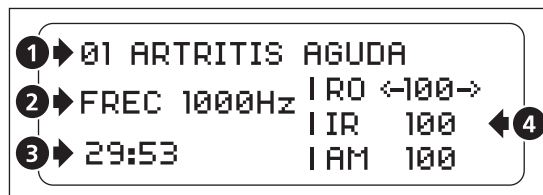

Una vez iniciado el tratamiento observará los siguientes parámetros:

- 1- Programa seleccionado.
- 2- Frecuencia actual, se intercala cada 10 minutos.
- 3- Tiempo restante del tratamiento.
- 4- Intensidades de las 3 longitudes de onda.

Presione la perilla para seleccionar la longitud de onda que desea modificar su intensidad (**RO: Rojo, IR: Infrarojo, AM: Amarillo**), una vez seleccionado gire dicha perilla para incrementar (sentido horario) o disminuir (sentido anti-horario) la intensidad.

Número de programa	Efectos - Patología	Rango Hz			Tiempo min.
1	Artritis aguda	30	-	50	30
2	Artritis subaguda	100	-	300	30
3	Artritis crónica	1000	-	2000	30
4	Artrosis de Cadera aguda	50	-	150	30
5	Artrosis de Cadera subaguda	400	-	600	30
6	Artrosis de Cadera crónica	2500	-	4000	30
7	Columna Cervical aguda	10	-	30	30
8	Columna Cervical subaguda	200	-	300	30
9	Columna Lumbar crónica	3000	-	5000	30
10	Columna Lumbar aguda	15	-	30	30
11	Columna Lumbar subaguda	300	-	500	30
12	Columna Lumbar crónica	3000	-	4000	30
13	Dolor muscular agudo	10	-	30	30
14	Dolor muscular subagudo	500	-	700	30
15	Dolor muscular crónico	3000	-	5000	30
16	Dolor post-traumático agudo	15	-	50	30
17	Dolor post-traumático subagudo	400	-	800	30
18	Dolor post-traumático crónico	3000	-	4000	30
19	Efectos sedante. Liberación de beta-endorfinas	40	-	60	30
20	Efectos sedante. Liberación de beta-endorfinas	200	-	500	30
21	Efectos sedante. Liberación de beta-endorfinas	2000	-	3000	30

22	Estados de relajación muscular en estado agudo	5	-	10	30
23	Estados de relajación muscular en estado subagudo	800	-	1000	30
24	Estados de relajación muscular en estado crónico	3500	-	5000	30
25	Inflamación aguda	25		50	30
26	Inflamación subaguda	300		700	30
27	Inflamación crónica	2500		4500	30
28	Liberación de endorfinas	38	-	55	30
29	Neuralgia aguda	50		100	30
30	Neuralgia subaguda	200	-	800	30
31	Neuralgia crónica	2500		4000	30
32	Producción de opiáceos endógenos. Sedativo	3	-	5	30
33	Regeneración del tejido nervioso	2	-	5	30
34	Síndrome cervicobraquial agudo	2	-	10	30
35	Síndrome cervicobraquial subagudo	5	-	15	30
36	Síndrome cervicobraquial crónico	250	-	500	30
37	Tendovaginitis aguda	3	-	15	30
38	Tendovaginitis subaguda	300	-	800	30
39	Tendovaginitis crónica	3000	-	4000	30
40	Traumatismo en cervical. Contracturas	15	-	35	30
41	Traumatismo en cervical. Contracturas	300	-	600	30
42	Traumatismo en cervical. Contracturas	2000	-	4000	30

Modo Programas.

Para modificar los parámetros gire la perilla en sentido horario para incrementar, o en sentido anti-horario para disminuir. Presione la misma para confirmar y continuar con la configuración.



NOTA: El E-Photon está diseñado para trabajar con dos frecuencias, esta modulación se realiza automáticamente cada 10 minutos a las frecuencias indicadas y es advertida por una alarma sonora. En el caso que no quiera modulación, debe bajar la frecuencia 2 hasta por debajo 1Hz hasta que vea la palabra NO, en este caso el equipo trabajara a la frecuencia 1.


Parámetros:

Frecuencia 1: 1 – 5000Hz.


Frecuencia 2: NO, 1 – 5000Hz.

Tiempo: 10 – 60min.

Presione la perilla para continuar.

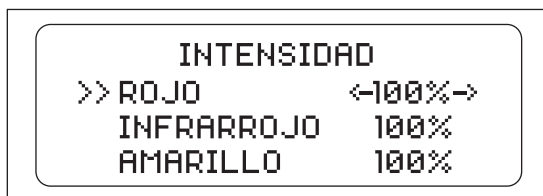

Para modificar las intensidades gire la perilla en sentido horario para incrementar, o en sentido anti-horario para disminuir. Presione la misma para confirmar y continuar con la configuración.

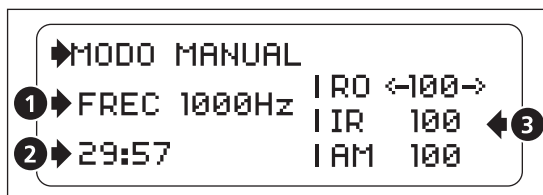


1 – Frecuencia actual de trabajo (cada 10 minutos modula).

2 - Tiempo restante del tratamiento.

3 – Intensidades de las 3 longitudes de onda (RO: Rojo, IR: Infrarojo, AM: Amarillo).

Pausa del programa:

Si desea pausar el programa, mantenga presionado la perilla hasta que en pantalla se muestre la siguiente leyenda.

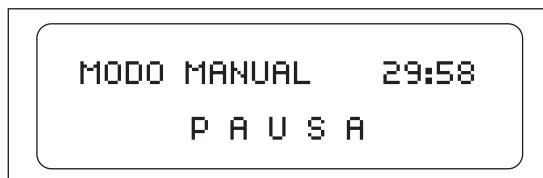


Presione nuevamente para reanudar el programa o mantenga presionado si desea cancelarlo.



Detector de Infrarrojo:

E-Photon vienen provisto de un detector de Infrarrojo. Conecte el detector en la parte posterior del equipo (ver punto 04), una vez iniciado el tratamiento ubique el lápiz detector enfrentado a cada uno de los leds infrarrojos.

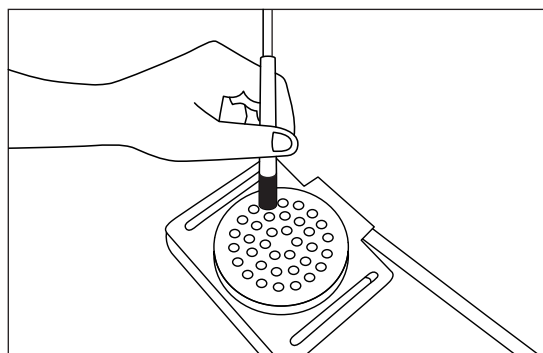

Si es detectado se escuchará una alarma sonora y se vera en pantalla el siguiente mensaje:



NOTA: Si en algún caso algún led infrarrojo no es detectado, acérquese al servicio técnico con el equipo completo (ver punto 16 » CONTACTOS / SERVICIO TÉCNICO).

06 » TRATAMIENTO

Indicaciones.

- Estimula la granulación del tejido y las proyecciones del tejido conectivo
- Cicatrización de heridas y quemaduras.
- Reduce la excitabilidad del tejido nervioso.
- Analgesia.
- Dolor Cervical, Toraco-lumbar. Lumbo-Sacro.
- Dolor en Articulaciones. Hombro. Codo. Carpo. Cadera. Rodilla. Tarso.
- Enfermedad degenerativa articular. (Artrosis)
- Reducción de formación de tejidos fibrótico.
- Procesos inflamatorios agudos o crónicos.
- Lesiones dolorosas en Ligamentos y Tendones.
- Tendinitis.
- Neuritis, neuralgias, contracturas musculares.
- Relajación muscular.
- Estimula la actividad fibroblástica que ayuda en el proceso de reparación. Los fibroblastos están presentes en el tejido conectivo y son capaces de formar fibras de colágeno.
- Estimula la granulación del tejido y las proyecciones del tejido conectivo, parte del proceso de curación.

07 » CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO



ATENCIÓN:

Apague y desconecte siempre el equipo de la red antes de efectuar cualquier operación de limpieza.



ATENCIÓN:

Una vez concluída la vida útil del equipo y sus accesorios, reciclarlo en base a las normas ambientales vigentes en su región. No descharlo con la basura doméstica.



- Limpiar la carcasa con un paño humedecido en agua, evitando así el depósito de polvo y/u otros agentes atmosféricos.
- Tener en cuenta que éste equipo NO es apto para el uso en presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.
- No utilizar productos de limpieza corrosivos ni oleosos, tales como aguarrás, thinner o símil.

08 » CONTRAINDICACIONES

- Zonas hemorrágicas.
- Zonas isquémicas.
- Zonas anestesiadas.
- Infecciones agudas.
- Neoplasias.
- Verrugas sospechosas.
- Pacientes fotosensibles.

09 » ADVERTENCIAS

Antes de tratar a un paciente, lea atentamente el manual de usuario.

Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo, capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones.

Mantenga éste equipo fuera del alcance de los niños.

El paciente siempre tiene que estar a la vista del profesional.

Tener en cuenta que éste equipo NO es apto para el uso en presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.

No tape las rejillas de ventilación, manténgalas siempre libres para asegurar el buen funcionamiento del equipo.

Nunca inserte objetos de ningún tipo a través de las distintas aberturas de respiración, ventilación y salidas que la unidad de comando posee.

Ante cualquier caída del equipo, diríjase al servicio técnico para ser controlado. No trate de utilizarlo sin previo control.

El tratamiento de pacientes con dispositivos electrónicos implantados es contraindicado.

Procure un buen cuidado de los distintos accesorios y su higiene.

Dependiendo de la zona a tratar, retirar todos los aparatos eléctricos y objetos metálicos del paciente, antes de iniciar el tratamiento.

La operación del equipo en cercanías (menos de un metro) a un aparato de terapias por ondas cortas o microondas, puede alterar la señal de salida y los indicadores de funcionamiento.

Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, este equipo solo debe ser conectado a una red de alimentación con tierra de protección.

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario. Cualquier desperfecto o falla consulte con el representante autorizado.

El cable de alimentación solo debe ser reemplazado por personal del servicio técnico autorizado.


Utilice solamente los accesorios proporcionados por el fabricante. Manéjelos con cuidado, un uso inapropiado puede causar rotura en los mismos.

No debe ingresar en el equipo ningún tipo de material ni líquido externo.

Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo a las instrucciones puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor (aparato afectado), aumente la distancia entre equipos, conecte el equipo en un toma distinto del que está conectado los otros equipos o consulte con el servicio técnico.

10 » ACCESORIOS


- 1 Bolso
- 4 Aplicadores.
- 1 Manual y Garantía.
- 1 Sensor de Infrarrojo.
- 4 Bandas elásticas 80cm.

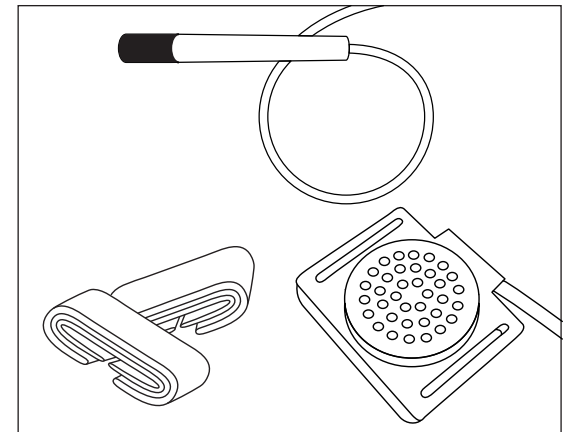

11 » DATOS TÉCNICOS

Temperatura de funcionamiento (°C)	10 a 30
Humedad de funcionamiento (%)	0 a 70
Salida	4 extensible a 6
Programas	42
Timer (minutos)	10-60
Tipo de emisión (Hz)	1 - 5000
Longitud de onda (nm)	591 - 660 - 905
Potencia de cada aplicador (mW/sr)	
Infrarrojo	1280
Rojo	7560
Amarillo	9600
Potencia de salida (VA)	15
Frecuencia (Khz)	60 - 50
Tensión de Línea (Volt)	110 - 220
Clase de seguridad (IEC 60601)	Clase I, Parte aplicable tipo BF
Peso sin accesorios (Kgr)	1.5
Peso total (Kgr)	3
Gabinete	Alto Impacto, apto para uso hospitalario o consultorio
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPX0
Temperatura de Transporte / Almacenaje (°C)	5 a 50
Humedad de Transporte / Almacenaje (%)	0 a 80
Presión de Transporte / Almacenaje (hPa)	500 a 1060

Medidas

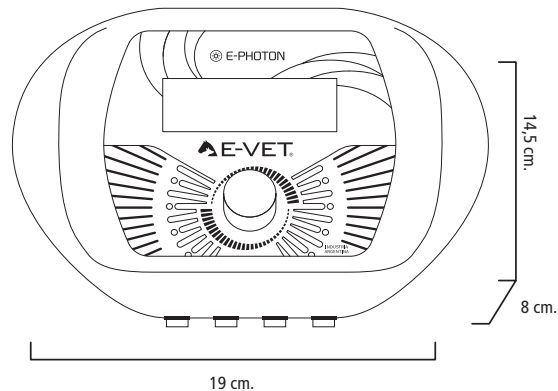

12 » SIMBOLOGÍA

	Tierra protectora		Límites de temperatura
	Parte aplicable Tipo B		Fragil
	Radiación no ionizante		Este lado arriba
	Atención, consulte documentación		Límites de humedad
	Fecha de fabricación		No apilar más de 5 bultos
	Encendido		Proteger de la humedad
	Apagado		

13 » CONTROL DE ENTREGA

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Equipo E-Photon. | <input type="checkbox"/> 1 Manual y Garantía. |
| <input type="checkbox"/> 1 Bolso. | <input type="checkbox"/> 1 Sensor de Infrarrojo. |
| <input type="checkbox"/> 4 Aplicadores. | <input type="checkbox"/> 4 Bandas elásticas de 80cm. |

14 » SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El display no enciende.	Falta de energía.	Verifique que el equipo se encuentre correctamente conectado a la red de suministro eléctrico y que se halla accionado la tecla de encendido. Si el equipo continúa con la falla diríjase al servicio técnico.
El equipo no emite.	Falla del cable del aplicador o leds	Controle los leds infrarrojos con el detector, si algunos de estos o de los demás leds tienen alguna falla, reemplace el aplicador por otro, si se soluciona el problema diríjase a servicio técnico con el equipo completo.
	Falla interna del equipo.	Controle los leds infrarrojos con el detector, si algunos de estos o de los demás leds tienen alguna falla, reemplace el aplicador por otro, si continua el problema diríjase a servicio técnico con el equipo completo.

Terminos de la Garantía.

Electromedicina Morales garantiza el normal funcionamiento de este producto por un periodo de dos (2) años desde la fecha de entrega en sus locales propios de venta o por un distribuidor autorizado. Esta garantía está limitada al comprador original y no puede ser reasignada o transferida. Quedan excluidos de esta garantía los materiales cuyo deterioro es normal, como los accesorios, fusibles y partes descartables.

La única obligación de Electromedicina Morales será reparar o reemplazar cualquier elemento que se considere defectuoso por razones de fallas en los materiales o durante la fabricación. Electromedicina Morales se reserva el derecho de determinar la existencia o no de un defecto.

Todo reclamo dentro del período de garantía deberá ser realizado por escrito a Electromedicina Morales. El comprador deberá enviar el producto a Electromedicina Morales, con flete prepagado.

Esta garantía se invalida si el producto ha sido dañado por accidente o maltrato o haya sido dañado por abuso o negligencia en la operación o mantenimiento del producto.

Esta garantía se invalida si el producto ha sido reparado o modificado por personas no autorizadas por Electromedicina Morales, o si el número de serie ha sido alterado o removido.

Esta garantía se invalida si cualquiera de las partes y accesorios del aparato no ha sido conectada, instalada o ajustada en concordancia con las instrucciones descriptas en el manual de uso.

ESTA GARANTIA CONTIENE TODAS LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR ELECTROMEDICINA MORALES NO EXISTIENDO OTRAS GARANTIAS EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O EN ESTATUTOS. LOS COMPRADORES ACEPTAN ASUMIR TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO, LESIONES CORPORALES O MUERTE QUE PUEDA RESULTAR POR EL USO O MALTRATO DEL APARATO Y SUS ACCESORIOS POR EL COMPRADOR, SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES O CLIENTES. ELECTROMEDICINA MORALES NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO DE NINGÚN TIPO. ESTA GARANTÍA NO SERA MODIFICADA DE NINGUNA FORMA SIN LA EXPRESA AUTORIZACION DEL PERSONAL DE ELECTROMEDICINA MORALES.

ESTA GARANTÍA SE INVALIDA A MENOS QUE LA TARJETA DE ACTIVACIÓN DE GARANTÍA HAYA SIDO COMPLETADA Y ENVIADA A ELECTROMEDICINA MORALES DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE LA FECHA DE COMPRA.

La información contenida en este manual será corregida en el momento de impresión, no obstante, Electromedicina Morales S.R.L. tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades existentes. En ningún caso Electromedicina Morales y sus distribuidores serán responsables por eventuales daños ocasionados de forma directa, indirecta, accidental o consecencial que se produjeren por un uso inadecuado y/o negligente de este equipo y sus accesorios, incluyendo fallas del mismo. Una vez concluida la vida útil del equipo (estimada en 5 años) Electromedicina Morales no se responsabiliza por las consecuencias de defectos eventuales del producto.

Formulario N°: MU61 REV. 00



Tarjeta de activación de Garantía.

Remitir a Electromedicina Morales por correo o e-mail.

Nombre del usuario: Fecha:

Institución:

Domicilio: Código Postal:

Localidad: País:

Teléfono: Fax:

E-mail:

Modelo: Serie Nro:

Distribuidor o Representante:

Ayúdenos a mejorar la calidad de nuestros productos enviando sus sugerencias y/o comentarios:

16 » CONTACTOS / SERVICIO TÉCNICO

ELECTROMEDICINA MORALES

E-mail: info@electromedicinamorales.com

Web: www.electromedicinamorales.com

www.facebook.com/electromedicinamorales

www.twitter.com/emorales_online

www.youtube.com/electromorales



SUCURSAL RIVADAVIA

Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX), Ciudad de Bs. As. Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4642-7247

SUCURSAL VIAMONTE:

Viamonte 2250 (C1056ABJ), Ciudad de Bs. As. Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 4951-9168

SERVICIO TÉCNICO

Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX), Ciudad de Bs. As. Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4642-7247

