


DEEPSKIN

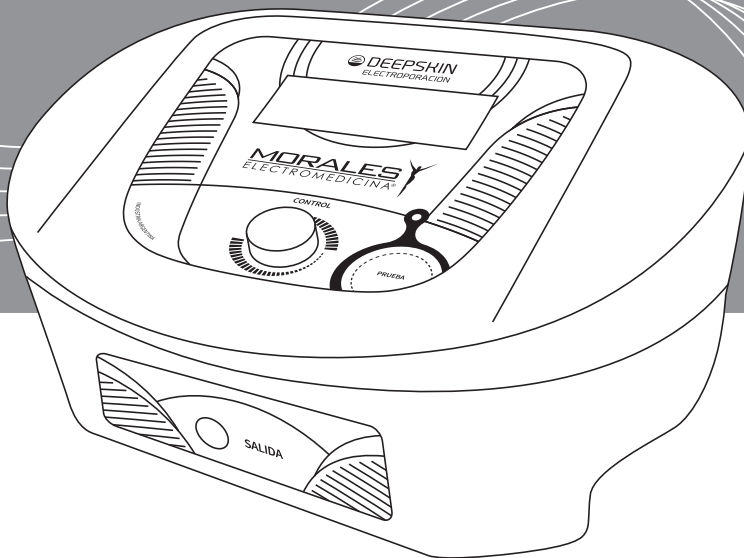

Electroporación

MORALES
ELECTROMEDICINA®

ÍNDICE

PÁG.	SECCIÓN
3	01 » EMPRESA
4	02 » INTRODUCCIÓN
5	03 » EFECTOS / BENEFICIOS
6	04 » EQUIPO
6	05 » USO
12	06 » TRATAMIENTO
12	07 » CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
13	08 » CONTRAINDICACIONES
13	09 » ADVERTENCIAS
14	10 » ACCESORIOS
15	11 » DATOS TÉCNICOS
16	12 » SIMBOLOGÍA
16	13 » CONTROL DE ENTREGA
16	14 » SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
17	15 » GARANTÍA
18	16 » CONTACTOS / SERVICIO TÉCNICO
19	17 » NOTAS

01 » EMPRESA

Desde 1981, época en que **ELECTROMEDICINA MORALES** se inicia en el mercado de la medicina estética, fabricando su primer producto, el depilador por radiofrecuencia, y muy pronto vería la luz un segundo equipo, el ionto-contractor, de un avanzado diseño para la época, le permitiría introducirse definitivamente en el mercado de la belleza profesional siguiendo en camino con el desarrollo de aparatología para profesionales.

Dirigidos a kinesiólogos, médicos, cosmiatras, esteticistas, cosmetólogas y profesionales de la belleza en general, **ELECTROMEDICINA MORALES** continua desarrollando equipos de alta calidad, de la mano de los últimos avances tecnológicos.

Desde entonces, **ELECTROMEDICINA MORALES** sigue creciendo en estructura, recursos humanos y confiabilidad de sus productos, consolidándose como empresa de producción de equipamiento para kinesiología y estética.

Siempre manteniendo su **VISION, LIDERAZGO y CALIDAD**, como base la tecnología, innovación y postventa.

Nuestra Misión.

Nuestra misión es el diseño, fabricación, comercialización y la asistencia técnica post-venta para equipamiento electromédico, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y usuarios en el tratamiento integral de la estética corporal, kinesiología, cosmética y las actividades de asesoramiento y capacitación que permiten maximizar las prestaciones de nuestros productos.

Nuestra Visión.

Ser reconocidos entre nuestros clientes, usuarios y distribuidores por nuestra calidad de atención, la de nuestros servicios de asesoramiento y capacitación y sobre todo, por la calidad de nuestros productos, servicio post-venta y asistencia técnica.
Por todo lo expuesto, es que nos esforzamos en forma permanente para cumplir con nuestros objetivos.

Nuestra Política de Calidad.

Nuestra misión y visión solo pueden ser tangibles mediante el compromiso de la Dirección General con los siguientes valores fundamentales, los cuales son comunicados y se consideran los cimientos para la construcción de nuestra organización:

- Nos comprometemos con la satisfacción de nuestros clientes comunicando nuestros objetivos a todo el personal y brindando los recursos necesarios para que la calidad de nuestros productos y servicios sea una consecuencia de la calidad de gestión de nuestros procesos.

- Nos comprometemos con el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, los legales y reglamentarios y cualquier requisito, aún aquellos no especificados pero necesarios para la seguridad y eficacia de nuestros productos.

- Nos comprometemos con la participación del personal, entendiendo que los Recursos Humanos son nuestro capital más importante y que la capacitación y la evaluación de su desempeño es la mejor inversión para el crecimiento de este capital.

- Nos comprometemos a evaluar a nuestros principales proveedores para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad, promover el compromiso y la participación y encontrar oportunidades de mejora.

- Nos comprometemos a mantener y mejorar la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad, mediante el establecimiento y seguimiento de indicadores que nos permitan verificar el cumplimiento de nuestros objetivos sin descuidar la rentabilidad de nuestra empresa.

- Nos comprometemos a comunicar, implementar y asegurar que esta Política es comprendida por toda la organización y a que la información que suministre nuestro sistema de gestión sea la herramienta de análisis para su continua adecuación.

02 » INTRODUCCIÓN

La electroporación es una alternativa no invasiva a la mesoterapia convencional, por lo que en la actualidad se la conoce con el nombre de mesoterapia virtual, que permite la introducción de fármacos *de forma localizada (indolora) sin la necesidad de métodos invasivos como la utilización de agujas intradérmicas, etc.*

Consiste en la emisión de una onda electromagnética (con predominio del campo eléctrico) pulsada, atérmica y no ionizable con la finalidad de producir una alteración en el potencial de membrana. Ésta alteración provoca una electrorotación de los lípidos con la consiguiente apertura momentánea de la membrana celular (poros) para el ingreso de sustancias hacia su interior. Este mecanismo tiene la particularidad de ser reversible y transitorio debido a la característica de la corriente: pulsada, no constante.

En 1965 se descubrió que los liposomas (bolsas rodeadas de una membrana lipídica a semejanza de una célula eucariota animal) eran capaces de hacer entrar DNA en la célula, pero hasta 1980 no se consiguió una eficacia de transfección adecuada. Un transporte eficiente necesita un sistema que garantice que nuestra sustancia llegará al interior celular y se activará. Mediante la electroporación, se altera de manera transitoria la permeabilidad de la membrana plasmática lo que ocasiona la apertura de los canales intracelulares y posibilita la introducción de activos electroporados. La electroporación también abre finísimos canales en la epidermis a través de los lípidos del espacio intercelular.

Esta vía es quizás la más importante en las aplicaciones médico estéticas de esta tecnología, ya que permite el paso de sustancias a través de la piel. Al aplicar una corriente alternada, lo que hacemos es mover las células de la capa externa de la piel, y este movimiento genera la apertura y modificación de espacios por los cuales la difusión de productos a través de la piel se facilita.

La electroporación provoca un reacomodamiento físico de las células de la piel. Al ser la corriente de electroporación alternada (o sea que cambia de dirección permanentemente) logramos que este reacomodamiento sea continuo, y que vaya generando nuevos poros y canales mientras la corriente esté activa.

La electroporación permite introducir tanto micro como macromoléculas, inclusive mayores a 800.000 Dalton como el ácido hialurónico o la heparina, o de 500.000 Dalton como el colágeno. Los liposomas constituidos por fosfatidilcolina son el mejor vehículo para el aporte de sustancias mediante esta tecnología. A la hora de encarar un tratamiento, el riesgo de dolencia o malestar es algo que todo paciente evalúa. Para los que aún no se han enterado de este virtuoso y revolucionario método, se trata de introducir principios activos al interior de las células de la piel para lograr múltiples beneficios, sin ningún tipo de dolor.

La Electroporación trabaja a partir de la emisión de ondas electromagnéticas, las cuales producen en la membrana celular los llamados electroporos, de allí el nombre del método. Los electroporos son poros transitorios que funcionan a modo de canales y a partir de los cuales se introduce el principio, indicado para cada tratamiento. Al aumentarse a 400 veces la permeabilidad celular, el ingreso del agente es rápido, efectivo y totalmente indoloro.



La electroporación está considerada apta para cualquier edad y no manifiesta ningún tipo de complicación, pudiéndose incorporar, incluso, más de un principio activo de tratamiento a la vez.

03 » EFECTOS / BENEFICIOS

DeepSkin implementa un sistema totalmente innovador en tratamientos basado en la emisión de una onda electromagnética pulsada y atérmica que tiene como propósito producir poros transitorios en la membrana celular para facilitar el ingreso de principios activos directamente al interior de la célula. Este método no invasivo potencia las propiedades de los liposomas como medios de transporte y es de una excelente efectividad. No provoca dolor ni sensaciones molestas.

- Ondas NO ionizantes y atérmicas.
- No existe contacto eléctrico con el paciente.
- No hay riesgo de quemaduras químicas, dolor e inflamación.
- No tiene efecto galvánico ni estimula el músculo.
- Carece de electrodo de retorno (placa neutra).
- No está contraindicado en prótesis.
- No invasivo.
- Introduce sustancias iónicas, no iónicas y lipofílicas e hidrofílicas.
- No precisa gel conductor.
- Práctico y de fácil manejo.
- Permanencia del efecto conseguido.

04 » EQUIPO

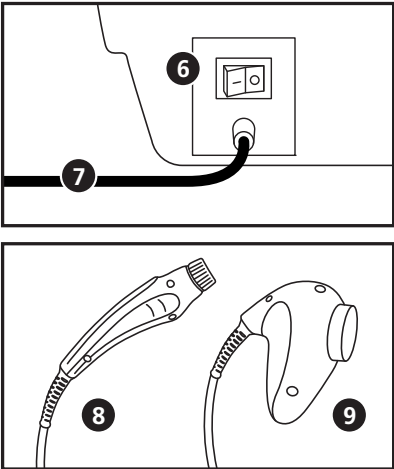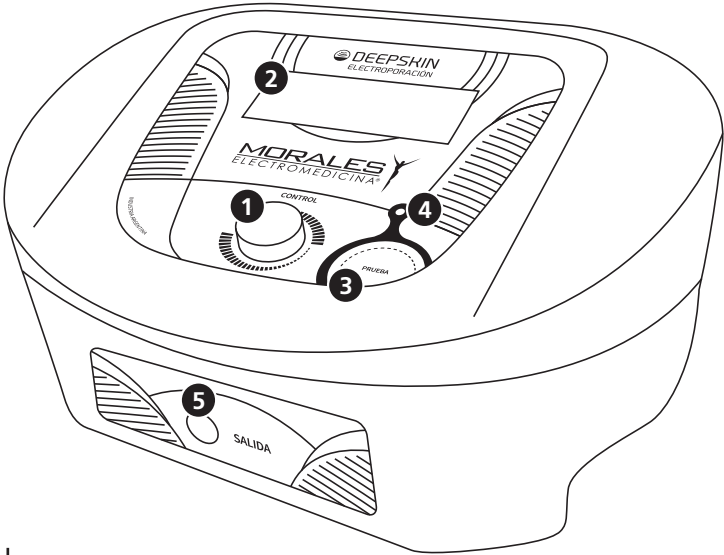

- 1- Control único.
- 2- Display.
- 3- Zona de prueba.
- 4- Indicador luminoso de funcionamiento.
- 5- Salida

- 6- Llave de encendido y apagado.
- 7- Cable de alimentación.
- 8- Cabezal facial.
- 9- Cabezal corporal.

05 » USO

Preparación de la zona de trabajo.

Higienizar la zona, previo pulido con algún gel pulidor para afinar la capa córnea y así facilitar la penetración del producto y de esta manera eliminar todo resto de oleosidad de la piel.

Configuración del equipo.

Conecte el equipo a un toma corriente de fácil acceso, asegúrese que el mismo posea una puesta a tierra segura. No tape las rejillas de ventilación, manténgalas siempre libres para asegurar el buen funcionamiento del equipo.
Conecte el cabezal a utilizar a la salida del equipos, que se encuentra en el lateral derecho.
Encienda el equipo por medio de la tecla que se encuentra en la parte posterior del mismo.

Verá la siguiente pantalla de Inicio.

A continuación mostrará la versión del Software.


A continuación mostrará la primera pantalla de configuración.

- Gire la perilla para seleccionar la opción deseada, luego presione la misma.
- Programas.
 - Manual.
 - Memoria.

Programas.

Gire la perilla para seleccionar el programa deseado, luego presione la misma para dar inicio.

En pantalla podrá observar el nombre del tratamiento, la zona a tratar, tiempo e intensidad del mismo.

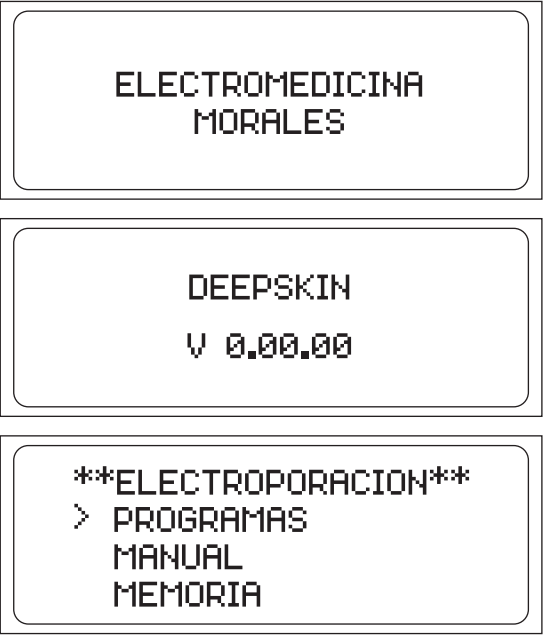

Programas Electroporación.

 CELULITIS EDEMATOSA Programa Nº 1 Zona: Corporal Tiempo: 30min Dosis: Máxima Intensidad: Intermedia	 ANTI-AGE FACIAL Programa Nº6 Zona: Facial Tiempo: 20min Dosis: Mínima Profundidad: Mínima	 HIDRATACIÓN CORPORAL Programa Nº11 Zona: Corporal Tiempo: 30min Dosis: Media Intensidad: Intermedia
 CELULITIS COMPACTA Programa Nº2 Zona: Corporal Tiempo: 30min Dosis: Máxima Intensidad: Profunda	 ANTI-AGE CORPORAL Programa Nº7 Zona: Corporal Tiempo: 30min Dosis: Media Profundidad: Intermedia	 CONTRACTURA Programa Nº12 Zona: Corporal Tiempo: 20min Dosis: Máxima Intensidad: Profunda
 ESTRÍA SUPERFICIAL Programa Nº3 Zona: Corporal Tiempo: 20min Dosis: Máxima Intensidad: Mínima	 REAFIRMANTE FACIAL Programa Nº8 Zona: Facial Tiempo: 20min Dosis: Mínima Intensidad: Mínima	 ANTIINFLAMATORIO Programa Nº13 Zona: Tiempo: 30min Dosis: Media Intensidad: Intermedia
 ESTRÍA PROFUNDA Programa Nº4 Zona: Corporal Tiempo: 20min Dosis: Máxima Intensidad: Intermedia	 REAFIRMANTE CORPORAL Programa Nº9 Zona: Corporal Tiempo: 30min Dosis: Máxima Intensidad: Profunda	 CAPILAR Programa Nº14 Zona: Capilar Tiempo: 20min Dosis: Media Intensidad: Mínima
 ADIPOSIDAD LOCALIZADA Programa Nº5 Zona: Corporal Tiempo: 30min Dosis: Máxima Intensidad: Profunda	 HIDRATACIÓN FACIAL Programa Nº10 Zona: Facial Tiempo: 20min Dosis: Mínima Intensidad: Mínima	 PERSONALIZADO 1 al 15 Programa Nº15 al 29 Zona: Tiempo: Dosis: Intensidad:

Una vez iniciado el tratamiento podrá observar en pantalla: el nombre, la zona a tratar, la intensidad y el tiempo restante.

Manual.

Gire la perilla para seleccionar la zona a tratar, luego presione la misma para confirmar.

Zonas a tratar:
Corporal.
Capilar.
Facial.

Gire la perilla para seleccionar la intensidad del tratamiento, luego presione la misma para confirmar.

Intensidades:
Profunda.
Media.
Mínima.

Gire la perilla para seleccionar el tiempo del tratamiento, luego presione la misma para confirmar.

Tiempo: **1 a 60min.**

Luego podrá **Comenzar** o **Grabar** en memoria el tratamiento.
Gire la perilla para selecciona alguna de las dos opciones, luego presione la misma para confirmar.

NOMBRE TRATAMIENTO
ZONA: CORPORAL |
INTENSIDAD: | TIEMPO
MEDIA | XX:00

****ELECTROPORACION****
PROGRAMAS
> MANUAL
MEMORIA

****ELECTROPORACION****
> ZONA: CORP
INTENS.: PROFUNDA
TIEMPO: XX minutos

****ELECTROPORACION****
ZONA: CORP
> INTENS.: PROFUNDA
TIEMPO: XX minutos

****ELECTROPORACION****
ZONA: CORP
INTENS.: PROFUNDA
> TIEMPO: XX minutos

>>>> COMENZAR
GRABAR

Comenzar.

Una vez iniciado el tratamiento podrá observar en pantalla: el nombre, la zona a tratar, la intensidad y el tiempo restante.

Grabar.

Gire la perilla para seleccionar el lugar en la memoria donde quiera guardar dicho programa, luego presione la misma para confirmar.




Mantenga presionada por 1 segundo la perilla para confirmar el lugar en la memoria donde va ser guardado el programa y comenzar el tratamiento.

Memoria.

Gire la perilla para seleccionar la memoria deseada, luego presione la misma para confirmar y dar inicio a dicho tratamiento.

En pantalla podrá observar en N° de memoria y los parámetros de dicho tratamiento: **Zona, Tiempo e Intensidad.**

NOTA: DeepSking esta provisto de 16 memorias para almacenar programas, a criterio del operador.

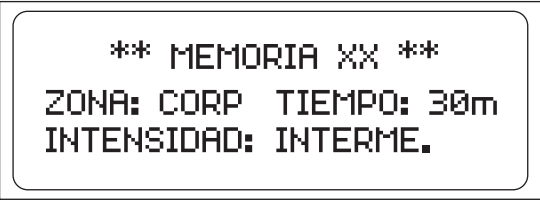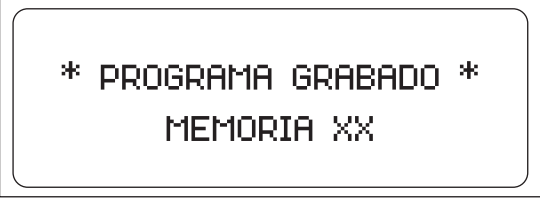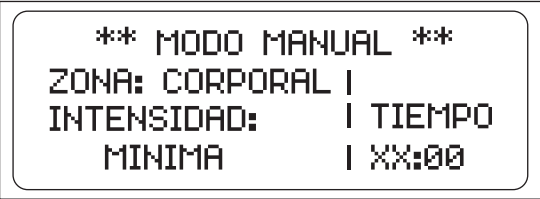

Pausa.


Si desea **Pausar** el tratamiento antes que este termine, presione la perilla por 1 segundo, el tiempo se detendra y observara la siguiente pantalla:

Si desea retomar el tratamiento vuelva a presionar la perilla (pulsado corto), si por el contrario desea finalizar el tratamiento, mantenga presionado nuevamente por 1 segundo la perilla y observará la siguiente pantalla:

NOTA: si desea retroceder en cualquier pantalla de la configuracion, se puede hacer manteniendo presionado 1 segundo la perilla.

Detección de cabezal.

DeepSkin esta provisto de un sensor de campo electromagnetico, el cual comprueba el correcto funcionamiento de los cabezales (corporal / facial). Con el cabezal conectado y el tratamiento iniciado, acerque la punta del cabezal a la zona de prueba y vera que el indicador luminoso se enciende.

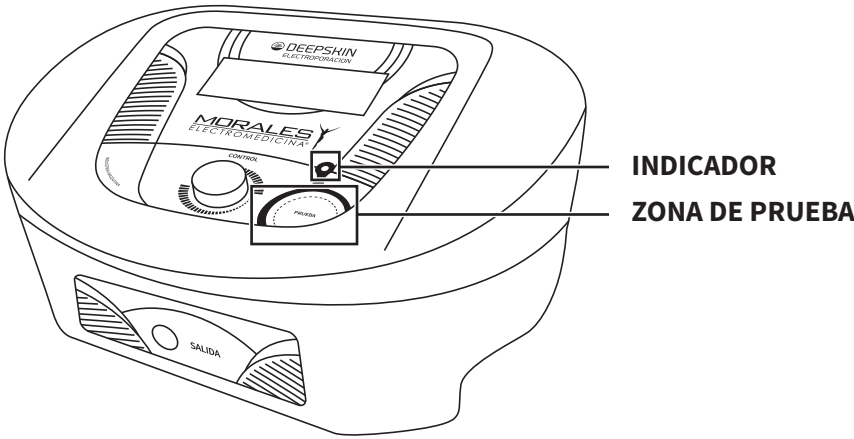

NOTA: si el indicador luminoso no se enciende, vea el punto 14 Solución de Problemas.

ATENCIÓN:
NO acercar el aplicador al frente del equipo, salvo sobre la zona de Prueba.
Esto puede causar mal funcionamiento del mismo.

06 » TRATAMIENTO

- Adiposidad localizada.
- Control de la obesidad.
- Rehidratación.
- Cicatrices.
- Celulitis.
- Anti-age.
- Flacidez.
- Estrías.
- Dolor.

07 » CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

- Para evitar el depósito de polvo y/u otros agentes atmosféricos, limpiar tanto la carcasa como sus accesorios con un paño humedecido en agua. No utilizar productos de limpieza corrosivos ni oleosos, tales como aguarrás, tiner o productos similares.
- Tener en cuenta que este equipo NO es apto para el uso en presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.
- Al finalizar el tratamiento conviene efectuar la limpieza de los cabezales con un paño suave humedecido con algún producto antiséptico, dejándolo seco y listo para un nuevo uso.
- Antes de comenzar el tratamiento controlar el buen funcionamiento de sus cabezales.



ATENCIÓN:

Apague y desconecte siempre el equipo de la red antes de efectuar cualquier operación de limpieza.



ATENCIÓN:

No sumergir los cabezales, ya que podría ingresar líquido en su interior.



ATENCIÓN:

Una vez concluida la vida útil del equipo y sus accesorios, reciclarlo en base a las normas ambientales vigentes en su región. No desecharlo con la basura doméstica.



08 » CONTRAINDICACIONES

- Pacientes en etapa gestacional.
- Pacientes con Marcapaso.
- Pacientes Epilépticos.
- Cardiopatías.
- Procesos Tumorales.
- Procesos Infecciosos.
- Estado febril.
- Afecciones Dermatológicas en el área de aplicación.
- No aplicar sobre tromboflebitis o varices floridas.
- Pacientes con alteraciones de la sensibilidad.

09 » ADVERTENCIAS

Antes de tratar a un paciente, lea atentamente las instrucciones de este manual. Comprenda las limitaciones y riesgos vinculados al uso de cualquier equipo de electromedicina.

Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo, capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones. A pedido del cliente, el fabricante proveerá material de capacitación específico.

Procedimientos de uso distintos a los especificados en este manual pueden ocasionar riesgo de lesión para el paciente y /o el terapeuta.

Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños.

El paciente siempre tiene que estar a la vista del profesional.

El tratamiento de pacientes con dispositivos electrónicos implantados (por ejemplo: marcapasos) está contraindicado.

No se debe tratar la parte anterior de cuello por el peligro de estimular el seno carotideo (provocar una crisis de hipotensión) por la presencia de la glándula tiroides y por el recorrido del paquete vasculonervioso.

La conexión simultánea al paciente de este equipo y de un equipo de radiofrecuencia puede resultar en quemaduras en el lugar donde se manipulen los accesorios y en posibles inestabilidades en la forma de onda de salida y en los indicadores de funcionamiento.

Tener en cuenta que este equipo NO es apto para el uso en presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con oxígeno y óxido de nitrógeno.

La operación del equipo en cercanías (menores a 1 metro) a un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejado inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores de funcionamiento.

Ante cualquier caída del equipo o de los cabezales, diríjase al servicio técnico para ser controlado. No trate de utilizarlo sin previo control.

No debe ingresar en el equipo ningún material o líquido externo como agua, inflamables, objetos metálicos, etc., ya que podría dañarse y producir descarga eléctrica, fuego o lesiones al paciente y/o al terapeuta.

A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por unos iguales a los originales en cuanto a tipo y clase.

Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, este equipo solo debe ser conectado a una red de alimentación con tierra de protección.

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario. Cualquier desperfecto o falla consulte con el representante autorizado.

El cable de alimentación solo debe ser reemplazado por personal del servicio técnico autorizado.

Utilice solamente los accesorios proporcionados por el fabricante. Manéjelos con cuidado, un uso inapropiado puede causar rotura en los mismos.

Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor, aumente la separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe diferente del que están conectados los otros equipos y/o consulte con el Departamento Técnico de la Fábrica.

Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones de los cables de conexión de línea, de los cabezales y del gabinete.

Durante su uso, no colocar el equipo en vecindades a otro equipo generador de calor.


No trabajar sobre los ojos ni los genitales.

Creemos que la información contenida en este manual será corregida en el momento de impresión, no obstante, Electromedicina Morales S.R.L. tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades existentes.

Electromedicina Morales S.R.L. declina toda responsabilidad por eventuales daños producidos a pacientes, atribuibles a no respetar las normas de seguridad y esterilización.


10 » ACCESORIOS

- 1- Cabezal facial - ACC_113
- 1- Cabezal corporal - ACC_112

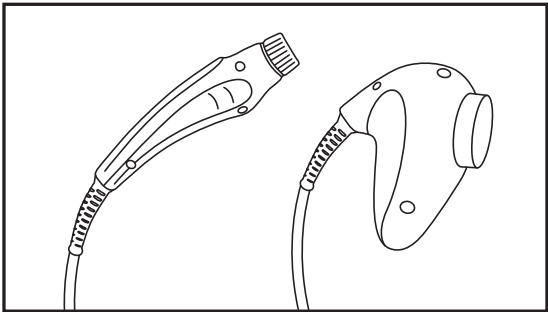

11 » DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Funcionamiento	10 a 30°C
Humedad de Funcionamiento	0 a 65%
Salidas	1
Temporizador (minutos)	1 a 60
Consumo Máximo (VA)	30
Potencia de salida (VA)	30
Memorias	16
Cabezales	Facial / Corporal
Temperatura de Transporte / Almacenaje	0 a 50°C
Humedad de Transporte / Almacenaje	0 a 80%
Presión de Transporte / Almacenaje	500 a 1060 hPa
Clase de Seguridad (según IEC60601)	Clase I, Parte aplicable tipo BF
Peso sin accesorios (Kg) 1.5	1.5
Peso total (Kg)	2.5
Grado de protección contra penetración de líquidos	IPX0
Gabinete	Alto impacto, apto para uso hospitalario o consultorio
Medidas (cm)	

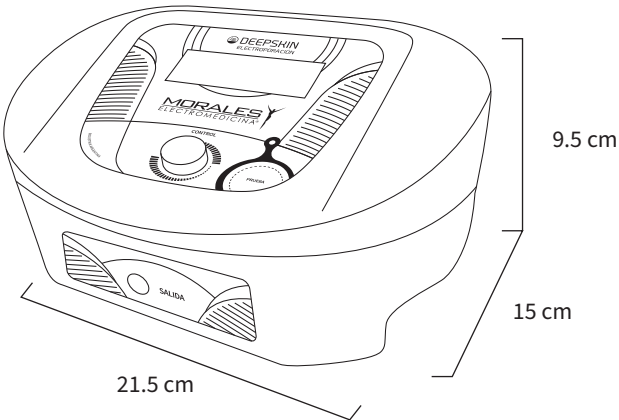

12 » SIMBOLOGÍA

 Tierra protectora	 Límites de temperatura
 Parte aplicable Tipo BF	 Fragil
 Radiación no ionizante	 Este lado arriba
 Atención, consulte documentación	 Límites de humedad
 Fecha de fabricación	 No apilar más de 5 bultos
	 Proteger de la humedad

13 » CONTROL DE ENTREGA

- ☐ 1- Equipo DeepSkin
- ☐ 1- Cabezal Corporal.
- ☐ 1- Bolso.
- ☐ 1- Manual / Garantía.
- ☐ 1- Cabezal Facial.

14 » SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Display no enciende.	Falta de energía.	Verifique que el equipo se encuentre correctamente conectado a la red de suministro eléctrico y que se haya accionado la tecla de encendido. Si el equipo continúa con la falla diríjase al servicio técnico.
El equipo no emite	Golpe o caída del cabezal.	Conecte el cabezal al equipo y haga correr el tratamiento. Coloque la punta del cabezal sobre la zona de prueba y observe si se prende el indicador luminoso, de no prenderse diríjase al servicio técnico con el equipo y los cabezales.
	Falla interna del cabezal o equipo.	Conecte el cabezal al equipo y haga correr el tratamiento. Coloque la punta del cabezal sobre la zona de prueba y observe si se prende el indicador luminoso, de no prenderse repita el procedimiento con el otro cabezal, si ambos cabezales no son detectado diríjase al servicio técnico con el equipo y ambos cabezales, de lo contrario lleve solo el que no es detectados .

15 » GARANTÍA

Terminos de la Garantía.

Electromedicina Morales S.R.L.® garantiza el normal funcionamiento de este producto por un período de dos (2) años desde la fecha de entrega en sus propios locales de venta o por un distribuidor autorizado, considerándose como fecha de entrega, la registrada en la factura o ticket de compra entregado al comprador original.

Esta garantía está limitada al comprador original y no puede ser reasignada o transferida. Quedan excluidos de esta garantía los materiales cuyo deterioro sea normal, como los accesorios, fusibles y partes descartables. Electromedicina Morales S.R.L.® se obliga exclusiva y únicamente a reparar o reemplazar cualquier elemento que se considere defectuoso por razones de fallas en los materiales o durante la fabricación. Electromedicina Morales S.R.L.® se reserva el derecho de determinar la existencia o inexistencia de algún defecto.

Todo reclamo durante el período de vigencia de la garantía deberá ser realizado por escrito a Electromedicina Morales S.R.L.®. El envío del producto en garantía deberá ser coordinado previamente con la empresa para evitar cualquier tipo de riesgo durante su transporte, sobre todo, cuando éste no sea realizado por Electromedicina Morales S.R.L.® y el mismo estuviese a cargo de un tercero. **Pérdida de la garantía:** en caso que el producto haya sido dañado por accidente y/o maltrato o haya sido dañado por uso abusivo o uso negligente en la operación y/o manipulación y/o mantenimiento del mismo, se produce automáticamente la pérdida de la garantía. La reparación y/o modificación del producto por personas no autorizadas por Electromedicina Morales S.R.L.®, como la alteración y/o remoción del número de serie del producto, genera la pérdida automática de la garantía.

Si cualquiera de las partes y/o accesorios del aparato no ha/n sido conectados y/o instalados y/o ajustados en concordancia con las instrucciones descriptas en el manual de uso provisto por la empresa, se produce en forma automática la pérdida de la garantía.

ESTA GARANTÍA CONTIENE TODAS LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR ELECTROMEDICINA MORALES S.R.L.® NO EXISTIENDO OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O EN ESTATUTOS. LOS COMPRADORES ACEPTAN ASUMIR TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO, LESIONES CORPORALES O MUERTE QUE PUEDA RESULTAR POR EL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO Y/O POR LA UTILIZACIÓN Y/O MANIPULACIÓN POR PERSONAL NO CAPACITADO O POR MALTRATO DEL APARATO Y/O SUS ACCESORIOS POR EL COMPRADOR, SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES O CLIENTES. ELECTROMEDICINA MORALES S.R.L.® NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑO DIRECTO O/Y INDIRECTO DE NINGÚN TIPO. ESTA GARANTÍA NO PODRÁ SER MODIFICADA DE NINGUNA FORMA SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL DE ELECTROMEDICINA MORALES S.R.L.®”.

La información contenida en este manual será corregida en el momento de impresión, no obstante, Electromedicina Morales S.R.L. tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades existentes. Una vez concluida la vida útil del equipo (estimada en 5 años) Electromedicina Morales S.R.L.® no se responsabiliza por las consecuencias de defectos eventuales del producto.

Formulario N°: MU26 REV. 08



Remitir a Electromedicina Morales por correo o e-mail.

Nombre del usuario: Fecha:

Institución:

Domicilio: **Código Postal:**

Localidad: Pa  s:

Teléfono: **Fax:**

E-mail: _____

Modelo: _____ Serie Nro: _____

Distribuidor o Representante: _____

Ayúdenos a mejorar la calidad de nuestros productos enviando sus sugerencias y/o comentarios:

16 » CONTACTOS / SERVICIO TÉCNICO

ELECTROMEDICINA MORALES

E-mail: info@electromedicinamorales.com

Web: www.electromedicinamorales.com

 www.facebook.com/electromedicinamorales

 www.twitter.com/emorales_online

 www.youtube.com/electromorales

**SUCURSAL RIVADAVIA**

Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX), Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4642-7247

SUCURSAL VIAMONTE:

Viamonte 2250 (C1056ABJ), Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 4951-9168

SERVICIO TÉCNICO

Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX), Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4642-7247

17 » NOTAS

